



protect. Lumbaforte

Назначение

Поясничный бандаж protect. Lumbaforte может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа..

Показания

- Боли в пояснице, вызванные заболеваниями межпозвонковых суставов
- Постуральный и мышечный дисбаланс в поясничной области
- Заболевания связок позвоночника
- Состояние после дисцеクтомии
- Боль в крестцово-подвздошном сочленении

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

Принцип действия

Значительно снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника и поддерживает мышцы спины, уменьшает боли в пояснице и регулирует мышечный тонус.

Рекомендации по применению

Для максимального лечебного эффекта protect.Lumbaforte следует носить регулярно. Если лечащий врач не порекомендовал иначе, не носите бандаж более 8 часов подряд. Возобновить использование бандажа можно после двухчасового перерыва.

Рекомендации по надеванию

- Придерживая бандаж левой рукой

за петлю на внутренней поверхности, оберните его вокруг талии (рис. 1).

- Прижмите левую часть бандажа к животу, правую часть расположите над левой и закрепите застежку (рис. 2). Опустите бандаж вниз, расположив нижний край изделия чуть выше паховых складок (рис. 3). Всегда носите бандаж под одеждой.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиэстер, полиамид, ПУ

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.